

AeroEclipse™ II

Adaptador de codo para Nebulizador activado por inhalación (NAI)

Instrucciones de uso

1. Retire la boquilla de la abertura lateral del nebulizador.
2. Inserte el Adaptador de codo en la abertura de la boquilla, hasta que esté ajustado.
3. Ajuste cualquier mascarilla de aerosol en el Adaptador de codo, asegurándose que todas las conexiones estén bien aseguradas.
4. Siga las instrucciones del usuario adjuntas al **AeroEclipse®** II NAI y utilícelo de acuerdo con las instrucciones.

Instrucciones de limpieza

Retire el adaptador de codo del **AeroEclipse®** II NAI y lávelo de acuerdo con las instrucciones del nebulizador con una solución de agua tibia y detergente líquido. Enjuague con agua tibia. Asegúrese de que las partes se sequen bien antes volver a armarlo.

Uso exclusivo de un único paciente

El dispositivo debe reemplazarse después de 7 días aproximadamente o de inmediato si los componentes se encuentran resquebrajados o el nebulizador no funciona adecuadamente. Este dispositivo no ha sido diseñado para reprocesarse y no debe esterilizarse con autoclave ni hervirse.

LIBRE DE LÁTEX

Fabricado para:

Monaghan Medical Corp.

5 Latour Ave., Suite 1600
Plattsburgh, NY 12901 USA
Tel. 800-833-9653 Fax 518-561-5088

Empaquetado por:

Trudell Medical International*

725 Third Street
London, Ontario, Canada

NÚMEROS DE REPOSICIÓN

AeroEclipse® II NAI	64594050
AeroEclipse® II NAI c/ codo	65050E
Adaptador de codo	65005
Máscara pequeña	65750
Máscara grande	65850

