

Nebulizador reutilizable activado por la respiración *AeroEclipse*[®] (R BAN)

Información para el paciente



A continuación se detalla un resumen de las instrucciones, pero recuerde leer las instrucciones completas que recibió con el nebulizador *AeroEclipse*[®] R BAN.

- 1 El nebulizador *AeroEclipse*[®] R BAN puede utilizarse con una máscara. Para ello, quite la boquilla provista e introduzca la máscara en la abertura correspondiente.
- 2 Desenrosque y quite la parte superior del nebulizador. Coloque con cuidado el medicamento recetado en el recipiente del nebulizador. Vuelva a conectar la parte superior del nebulizador y apriete a mano con suavidad.
- 3 Enchufe un extremo del tubo provisto en el conector de la parte inferior del nebulizador y el otro extremo al compresor. Asegúrese de que ambos extremos del tubo estén firmes.
- 4 Siéntese en una posición cómoda, vertical, y encienda el compresor. Colóquese la boquilla en la boca, pero tenga la precaución de no cubrir la válvula de exhalación con los labios.
- 5 Inhale lenta y profundamente. A medida que inhala, el botón de color verde en la parte superior del nebulizador se desplazará “hacia abajo”.
- 6 Exhale normalmente. El botón verde regresará a la posición “hacia arriba” cuando usted no esté inhalando.
- 7 Continúe respirando normalmente en el nebulizador hasta que comience a “chisporrotear” o según le indique el médico o profesional que le atiende.
- 8 Apague el compresor cuando finalice el tratamiento. Limpie el producto después de cada tratamiento, tal como se indica en el manual del propietario.

Este producto está diseñado para un solo paciente y tiene una vida útil de seis (6) meses si se utiliza, limpia y mantiene correctamente.



monaghan[™]