

# ENSAMBLAJE DE MÁSCARA DESECHABLE AEROECLIPSE® PARA AEROSOL

Para usarse con el nebulizador activado por la respiración (BAN) **AeroEclipse®** de Monaghan.

Solamente Rx

SIN LÁTEX

**PEQUEÑA** No de pieza 65750- Máscara AE, pequeña DESECHABLE 50/uds

## INSTRUCCIONES DE USO:

1. Extraiga el ensamblaje de la máscara del envoltorio, compruebe que no haya ningún componente dañado y verifique que el codo giratorio esté bien fijado a la máscara.
2. Extraiga la boquilla del nebulizador **AeroEclipse®**.
3. Acople el ensamblaje de la máscara al nebulizador **AeroEclipse®**.
4. Siga las instrucciones de uso que se suministran con el nebulizador **AeroEclipse®**.
5. Asegúrese de que la máscara esté bien sellada a la cara antes de usar el nebulizador **AeroEclipse®**. El codo incorporado en la máscara le permite girarla.
6. Si no puede activar el nebulizador **AeroEclipse®**, puede activarlo de forma manual oprimiendo y soltando el botón verde de retroalimentación a la vez que inhala y exhala, o también puede utilizar el dispositivo en modo continuo (vea las instrucciones de uso que se suministran con el nebulizador **AeroEclipse®**).

## PRECAUCIÓN:

Para uso de un solo paciente.

Guardar en un lugar fresco y seco.

Durante el tratamiento siempre debe estar presente un profesional de la salud.



**monaghan™**

Fabricado por:  
Monaghan Medical Corporation  
5 Latour Ave., Suite 1600  
Plattsburgh, NY 12901  
1.800.833.9653  
[www.monaghanmed.com](http://www.monaghanmed.com)

Por: Flexicare Medical Limited • Cynon Valley  
Business Park • Mountain Ash, CF45 4ER • U.K.  
T/+44(0)1443 474647  
ORIGEN- Fabricado en China

© 2005 Monaghan Medical Corp.

NP 65807-02 07/09

AeroEclipse® BAN es una marca comercial registrada de

Trudell Medical International.

Venticare® es una marca comercial registrada de Flexicare Medical Limited.

