

ENSAMBLAJE DE MÁSCARA DESECHABLE AEROECLIPSE® PARA AEROSOL

Para usarse con el nebulizador activado por la respiración (BAN) **AeroEclipse®** de Monaghan

Solamente **R_x**

SIN LÁTEX

MEDIANA No de pieza 65950 - Máscara AE, mediana DESECHABLE 50/uds

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Extraiga el ensamblaje de la máscara del envoltorio, compruebe que no haya ningún componente dañado y verifique que el codo giratorio esté bien fijado a la máscara.
2. Extraiga la boquilla del nebulizador **AeroEclipse®**.
3. Acople el ensamblaje de la máscara al nebulizador **AeroEclipse®**.
4. Siga las instrucciones de uso que se suministran con el nebulizador **AeroEclipse®**.
5. Asegúrese de que la máscara esté bien sellada a la cara antes de usar el nebulizador **AeroEclipse®**. El codo incorporado en la máscara le permite girarla.
6. Si no puede activar el nebulizador **AeroEclipse®**, puede activarlo en forma manual oprimiendo y soltando el botón verde de retroalimentación a la vez que inhala y exhala, o también puede utilizar el dispositivo en modo continuo (vea las instrucciones de uso que se suministran con el nebulizador **AeroEclipse®**).

PRECAUCIÓN:

Para uso de un solo paciente.

Guardar en un lugar fresco y seco.

Durante el tratamiento siempre debe estar presente un profesional de la salud.



monaghan™

Fabricado para:

Monaghan Medical Corporation

5 Latour Ave., Suite 1600

Plattsburgh, NY 12901

1.800.833.9653

www.monaghanmed.com

Por: Flexicare Medical Limited • Cynon Valley
Business Park • Mountain Ash, CF45 4ER • U.K.
T/+44(0)1443 474647

ORIGEN - Fabricado en China

© 2009 Monaghan Medical Corp.

PN 65809-00 07/09

AeroEclipse® BAN es una marca comercial registrada de

Trudell Medical International.

Venticaire® es una marca comercial registrada de Flexicare Medical Limited.

