
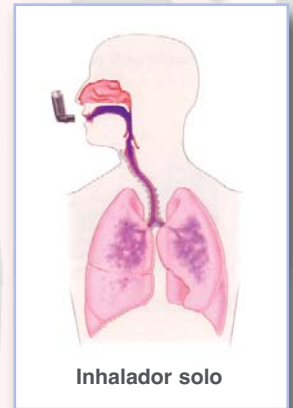


A continuación se detalla un resumen de las instrucciones, pero recuerde leer las instrucciones incluidas en el envase de su Cámara antiestática de soporte con válvula (aVHC) **AeroChamber Plus<sup>®</sup> Z STAT<sup>®</sup>**.

- 1 Quite la tapa del inhalador MDI y la cámara. *Antes de usarlo, asegúrese de haber leído las instrucciones que acompañan el inhalador MDI.*
- 2 Siempre agite el inhalador MDI inmediatamente antes de usarlo. Introduzca el inhalador MDI en la pieza posterior de la cámara aVHC.
- 3 Introduzca la boquilla en la boca y cierre los labios a su alrededor para un correcto sellado.
- 4 Exhale suavemente y presione el inhalador MDI al comenzar una inhalación lenta. Inhale lenta y profundamente por la boca hasta finalizar una respiración completa. **Administre una (1) bocanada de aire por vez.**
- 5 Retenga la respiración durante 5 a 10 segundos, si puede. En caso contrario, mantenga los labios apretados contra la boquilla para mantenerla sellada durante 2 a 3 inhalaciones después de presionar el inhalador MDI.
- 6 Inhale más lentamente si oye el silbido del **FLOWSignal<sup>®</sup>**.
- 7 Siga las instrucciones del inhalador MDI en cuanto al tiempo que debe esperar para repetir las instrucciones.

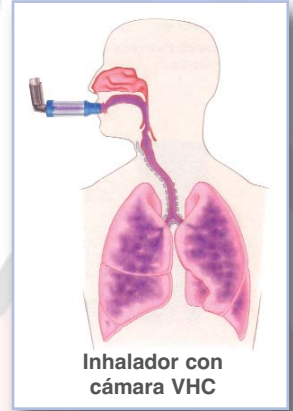

**monaghan<sup>™</sup>**