


**Guía de inicio rápido:
Instrucciones de uso**


1 Quite la tapa del MDI.

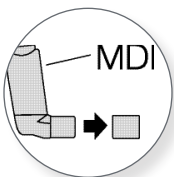


2 Agite el MDI.



3 Inserte el MDI en la cámara.

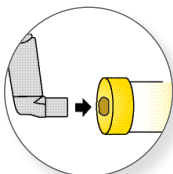

4 Coloque la mascarilla sobre el rostro.

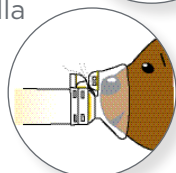

Estas son instrucciones de uso abreviadas; recuerde leer las instrucciones completas incluidas con el dispositivo de cámara de retención antiestática con válvula (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®.

CÁMARA DE RETENCIÓN ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®



Mascarilla grande

Boquilla



Mascarilla mediana

Mascarilla chica

5 Presione el MDI y cuente de 5 a 6 respiraciones.



6 Repita los pasos 2 a 5 según se prescriba.

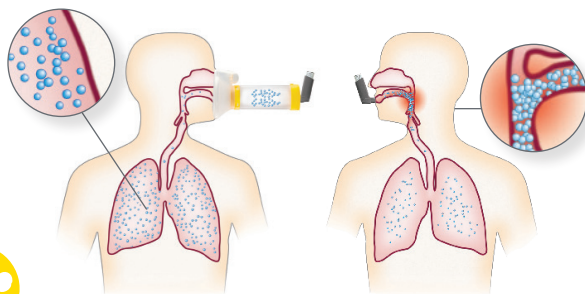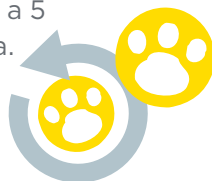

Uso del inhalador con la aVHC:
El medicamento llega a los pulmones

Uso del inhalador solo:
Se acumula más medicamento en la boca y en la garganta (potencial de efectos secundarios)



CÁMARA DE RETENCIÓN ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®



Mascarilla grande


Boquilla

Mediana Mascarilla

Mascarilla chica

Guía de inicio rápido: Instrucciones de limpieza


1 Retire la pieza delantera y la pieza trasera.

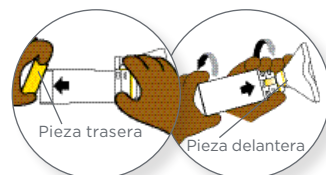

Pieza trasera

Pieza delantera


2 Remoje durante 15 minutos en agua jabonosa, agite suavemente y enjuague, o coloque en el estante superior de una máquina lavaplatos.

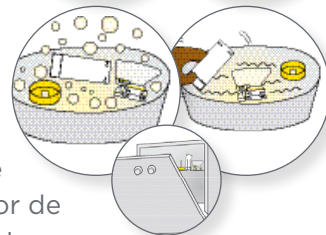

Estas son instrucciones de limpieza abreviadas; recuerde leer las instrucciones completas incluidas con el dispositivo aVHC AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®.

Encontrará las instrucciones para máquina lavaplatos en las instrucciones completas incluidas con la aVHC AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®.

3 Sacuda para eliminar el agua y seque verticalmente.

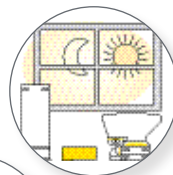

4 Vuelva a armar las piezas.

