

It's important to remember the following tips to gain a child's cooperation:



Never force the mask on the child or attempt to treat while the child is crying.



Give praise and rewards whenever the child is using the chamber correctly.



Practice short "pretend" treatments by having the mask near the child's face.

Remember to read the complete instructions that are packaged with your AEROCHAMBER® anti-static Valved Holding Chamber (aVHC).

AEROCHAMBER® aVHC MASK TIPS



Use teddy bears, dolls or even adults to "pretend" to use the chamber and make it look like a game.



Let the child play with the chamber while offering encouragement.



Give the treatment when the child is happy, playing or sleeping.



Give the child stickers to put on their chamber to make it their own.

Es importante recordar los siguientes consejos para obtener la cooperación del niño:



Nunca coloque la máscara o intente dar el tratamiento a la fuerza si el niño está llorando.



Elogie y recompense al niño cuando use la cámara correctamente.



Acerque la máscara a la cara del niño para practicar tratamientos fingidos “breves”.

Recuerde leer completamente las instrucciones incluidas con su cámara antiestática de retención con válvula AEROCHAMBER® (aVHC).

CONSEJOS SOBRE LA MÁSCARA AEROCHAMBER® aVHC



Utilice ositos de felpa, muñecas o incluso adultos para “fingir” que usan la cámara y que parezca un juego.



Deje que el niño juegue con la cámara mientras le alienta a usarla.



Realice el tratamiento cuando el niño esté contento, jugando o durmiendo.



Dé calcomanías al niño para pegar en la cámara, a fin de que la haga propia.