


AEROCHAMBER PLUS® CÁMARA DE RETENCIÓN ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA (aVHC) Z STAT®

Guía de inicio rápido Cómo usar su cámara


1 Retire la tapa del inhalador.

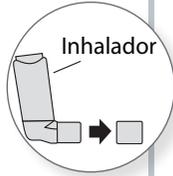


2 Agite el inhalador.



3 Inserte el inhalador en la parte posterior de la cámara.

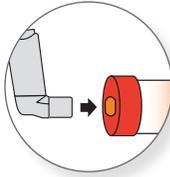

4 Coloque la máscara en el rostro.

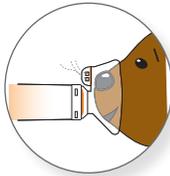

Máscara pequeña



Máscara mediana



Boquilla




Máscara grande


5 Presione el inhalador y cuente de 5 a 6 respiraciones.



6 Repita los pasos 2 a 5 según las indicaciones médicas.

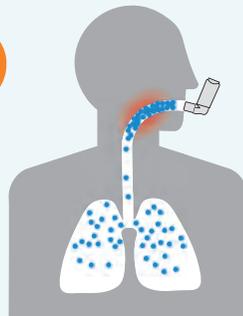

Uso del inhalador solo:
se acumula más medicamento en la boca y en la garganta (con efectos secundarios potenciales).

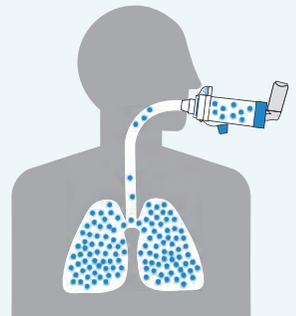

Uso del inhalador con aVHC:
llega más medicamento a los pulmones.



AEROCHAMBER PLUS® CÁMARA DE RETENCIÓN ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA (aVHC) Z STAT®


 Máscara
pequeña

 Máscara
mediana


Boquilla


 Máscara
grande

Guía de inicio rápido Limpieza de su cámara

1 Retire solo la pieza posterior.




2 Remoje durante 15 minutos en agua jabonosa, agite suavemente y enjuague, o coloque en la rejilla superior del avajillas.




Se pueden encontrar las instrucciones para el lavavajillas en las instrucciones completas que incluye su aVHC AEROCHAMBER PLUS® Z-STAT®.

3 Sacuda para eliminar el agua y seque en posición vertical.

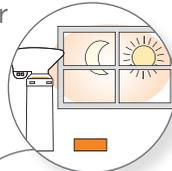

4 Vuelva a ensamblar la pieza posterior.

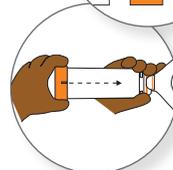

Estas son instrucciones de uso y limpieza abreviadas, recuerde leer las instrucciones completas que se incluyen con su cámara de retención antiestática con válvula (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® Z-STAT®.