


**Guía de inicio rápido**  
**Cómo usar su cámara**


**1** Retire la tapa del inhalador.

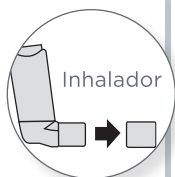


**2** Agite el inhalador.



**3** Inserte el inhalador en la parte posterior de la cámara.

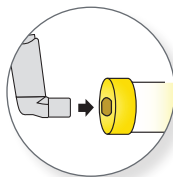


**4** Coloque la máscara en el rostro.

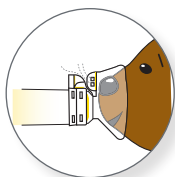


**CÁMARA DE RETENCIÓN ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®**



**5** Presione el inhalador y cuente de 5 a 6 respiraciones.

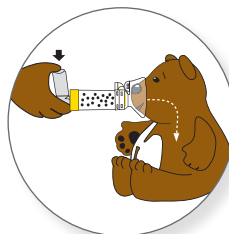


**6** Repita los pasos 2 a 5 según las indicaciones médicas.

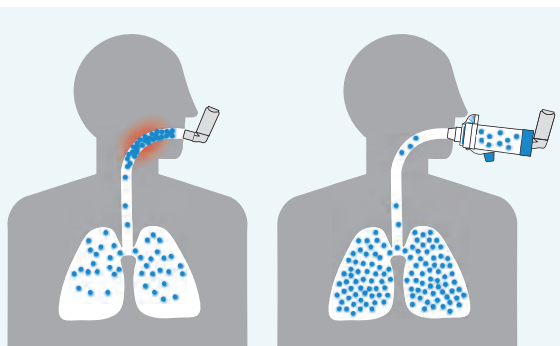

**Uso del inhalador solo:**  
se acumula más medicamento en la boca y en la garganta (con efectos secundarios potenciales).

**Uso del inhalador con aVHC:**  
llega más medicamento a los pulmones.

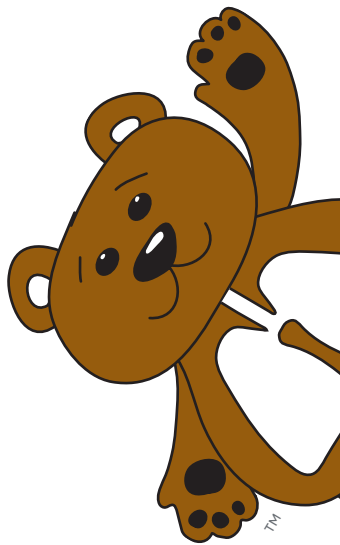

## CÁMARA DE RETENCIÓN ANTIESTÁTICA CON VÁLVULA (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®



Máscara pequeña

Máscara mediana


Boquilla

Máscara intermedia

Máscara grande

### Guía de inicio rápido Limpieza de su cámara


**1** Retire la pieza trasera y la pieza delantera.

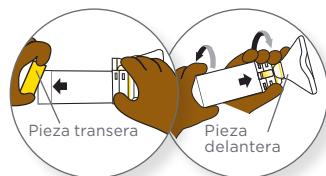

Pieza trasera


Pieza delantera

**2** Remoje durante 15 minutos en agua jabonosa, agite suavemente y enjuague, o coloque en la rejilla superior del lavavajillas.

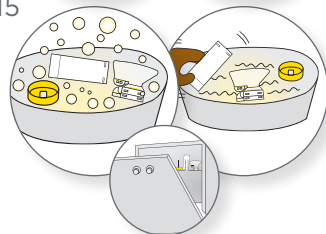


Se pueden encontrar las instrucciones para el lavavajillas en las instrucciones completas que incluye su aVHC AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®.

**3** Sacuda para eliminar el agua y seque en posición vertical.

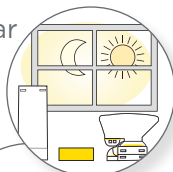

**4** Vuelva a armar las piezas.

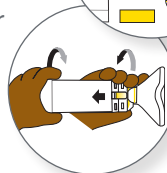

Estas son instrucciones de uso y limpieza abreviadas, recuerde leer las instrucciones completas que se incluyen con su cámara de retención antiestática con válvula (aVHC) AEROCHAMBER PLUS® FLOW-VU®.