


Cámara **2** en **1** + estuche protector



Aero2go™
Chamber

Cámara de retención con válvula antiestática

Fabricado por:

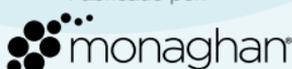

Monaghan Medical Corporation

153 Industrial Boulevard,
Plattsburgh, NY 12901

T 800-833-9653

customerservice@monaghanmed.com

www.monaghanmed.com

USO PREVISTO

Este producto está diseñado para que lo utilicen pacientes (mayores de 5 años) que estén bajo el cuidado o tratamiento de un médico o profesional de la salud autorizado. El dispositivo está diseñado con el objetivo de que estos pacientes lo utilicen para administrarse un medicamento en aerosol con la mayoría de los inhaladores de dosis medidas presurizados. Es un dispositivo de uso múltiple para un solo paciente, pensado para uso en el hogar.

CÓMO FUNCIONA

El uso de la cámara con el inhalador de dosis medida permite capturar y retener el medicamento hasta que esté listo para inhalarlo. Esto le da más tiempo para inhalar y ayuda a que el medicamento llegue a los pulmones, que es en donde usted lo necesita.

Advertencias

- Mire cuidadosamente dentro de la cámara. Si hay polvo u otro tipo de residuos visibles en el interior, limpie la cámara.
- Sustituya la cámara inmediatamente si está dañada o si le faltan piezas.

Precauciones


- No utilice la cámara con inhaladores de solución pulverizada fina (es decir, Respimat[†]), inhaladores de polvo seco o nebulizadores. La cámara no está diseñada para administrar estos medicamentos, por lo que es posible que no reciba la dosis adecuada.
- El incumplimiento de las instrucciones puede afectar la administración de medicamentos o provocar problemas de inhalación.

USO DE LA CÁMARA




Agite

el inhalador inmediatamente antes de usarlo (retire la tapa)

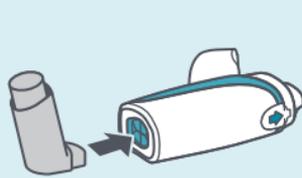

Inserte

el inhalador en la parte posterior de la cámara

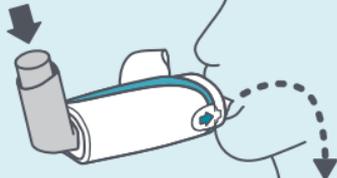

Presione

el inhalador mientras comienza a inhalar lenta y profundamente

Notas

- Asegúrese de leer estas instrucciones y las instrucciones suministradas con el inhalador, y de tenerlas disponibles en todo momento.
- Administre 1 descarga a la vez.
- La cámara debe sustituirse después de 12 meses de uso.
- USO CON SOLO UN PACIENTE.
- Las leyes federales (EE. UU.) solo permiten la venta de este dispositivo por parte de un médico o bajo la prescripción de un médico.
- Este producto no se fabricó con bisfenol A (BPA, por sus siglas en inglés), látex de caucho natural, ftalatos, plomo ni PVC.

Consejos

- Para ayudar a mejorar la administración del medicamento a los pulmones, después de respirar profundamente, intente contener la respiración entre 2 y 5 segundos antes de exhalar.
- Si no puede respirar profundamente ni contener la respiración, puede respirar a través de la cámara entre 2 y 3 veces para inhalar el medicamento.

CÁMARA 2 EN 1 + ESTUCHE PROTECTOR PARA SU INHALADOR

El inhalador se puede almacenar dentro de la cámara.

Siga estos pasos para abrir la cámara: Invierta el orden para cerrar. (cierre 2 y, luego, 1)




- La cámara está cerrada en ambos extremos, lo que ayuda a evitar el ingreso de residuos.
- Diseñada para adaptarse a los inhaladores recetados con mayor frecuencia. (Nota: El inhalador se vende por separado).

Advertencia

- Asegúrese de que usted (y, si corresponde, su hijo) pueda abrir la cámara antes de almacenar el inhalador en el interior.
- La cámara no está diseñada para que la utilicen niños menores de 5 años.

LIMPIEZA DE LA CÁMARA

- La cámara se puede utilizar directamente después de retirarla del empaque y se debe limpiar cada semana.

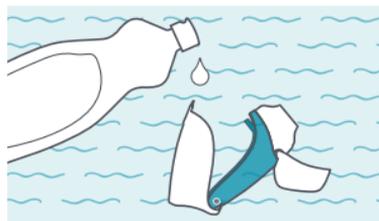


1 Levante la tapa y abra la cámara para retirar el inhalador.

2 Lave la cámara con agua tibia y limpia con detergente líquido para vajilla y agítela suavemente. Enjuáguela con agua limpia.

3 colóquela en la bandeja superior del lavavajillas, como se muestra en la imagen. Haga funcionar el lavavajillas en un ciclo normal o ligero. No seque con calor.

4 Sacuda el exceso de agua y deje secar al aire. Si necesita la cámara de inmediato, séquela suavemente con un paño limpio.

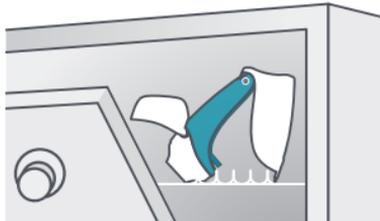

Notas

- Si nota acumulación del medicamento en la cámara, lave el interior de la cámara cuidadosamente con un paño suave y limpio.
- No hierva ni esterilice.
- No se recomienda lavar en lavavajillas junto con platos demasiado sucios.
- Si va a lavar en un lavavajillas, utilice abrillantador.
- Brillantador el inhalador, siga las instrucciones que se proporcionan con el inhalador.

Precaución

- El producto puede dañarse permanentemente si se hierve, se esteriliza o se lava en lavavajillas a una temperatura superior a 70 °C.

Puede descargar una versión electrónica de este prospecto en www.monaghanmed.com

Qty = 1

Rx ONLY

